



# Installatie-instructies

Geüpdatet 01-07-2021

## **Belangrijke informatie!**

De ontwikkeling van Otiom gaat continu door. Daarom kunnen een aantal aspecten van de Otiom-app afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

Ga naar [www.otiom.com/install](http://www.otiom.com/install)  
voor de nieuwste installatie-instructies.

# Aan de slag met uw Otiom.

Deze instructies helpen u de Otiom-startset klaar te maken voor gebruik.

Het is belangrijk dat u alle stappen in de handleiding uitvoert om zeker te zijn dat uw Otiom correct werkt.

**Otiom is pas gebruiksklaar als u een kennisgeving hebt ontvangen met de melding dat het systeem is geactiveerd en 100% gebruiksklaar is!**

## Benodigde tijd

10 minuten voor het installeren (deze instructies).  
Maximaal 30 minuten voor het activeren.

# Inhoud van de Otiom-startset

Uw Otiom-startset bevat een Otiom-tracker, een halskoord, een clip, een draadloze oplader en een basisstation.

Otiom-tracker



Clip



Halskoord



Otiom-basisstation  
met aan-uitknop



Draadloze oplader met kabel

## Wat u nodig hebt

- Een smartphone of tablet met iOS of Android.
- Een externe voeding. Gebruik bijvoorbeeld de oplader van uw mobiele telefoon of de USB-poort van uw computer.

## Wat u voor aanvang moet doen

Zorg dat u de Bluetooth-verbinding hebt ingeschakeld en internettoegang hebt voor uw smartphone of tablet.

### In 7 stappen aan de slag

**Stap 1.** Download de Otiom-app en log in

**Stap 2.** Toestemmingen

**Stap 3.** Activeer het basisstation


**Stap 4.** Plaats het Otiom-basisstation

**Stap 5.** Geef de Otiom-gebruiker een naam

**Stap 6.** Voeg de Otiom-tracker toe


**Stap 7.** Registreer het apparaat op het netwerk

# 1: Download de Otiom-app en log in

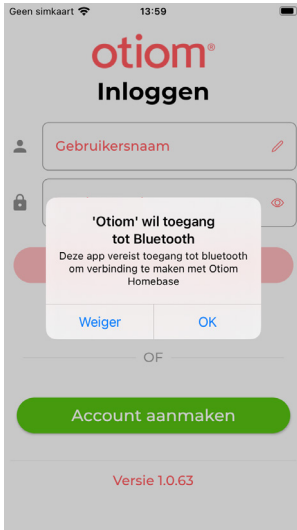

1. Ga naar de App Store of naar Google Play en download de Otiom-app.
2. Open de Otiom-app op uw smartphone.
3. Voor de eerste keer inloggen moet u een account aanmaken. Klik op 'Account aanmaken'.

## Crëer een nieuw account

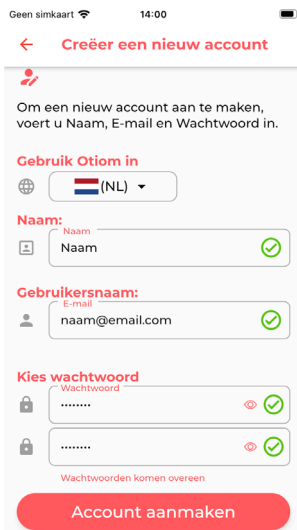


1. Selecteer het land waar u wilt installeren en gebruik de Otiom-tag.
2. Voer de naam van de beheerder in.
3. Voer het e-mailadres van de beheerder in. Dit wordt uw gebruikersnaam voor de app.
4. Begin met het invoeren van een wachtwoord en er wordt een veld voor het bevestigen van het wachtwoord weergegeven.
5. Als alle velden zijn ingevuld, wordt de knop 'Account aanmaken' weergegeven.
6. Klik op 'Account aanmaken'.
7. Het Account is nu gereed en u bent automatisch ingelogd.

# Welkomstbericht



1. Lees de welkomstpagina in de app.
2. Klik op "Start" als u klaar bent om de app in te stellen.

## 2: Toestemmingen

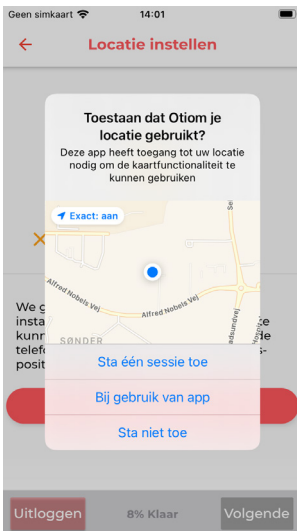

1. Geef Otiom toestemming om uw locatie te gebruiken.
2. Druk op volgende wanneer locatiegegevens zijn goedgekeurd.

U kunt de Otiom app niet gebruiken zonder goedkeuring.



1. Sta Otiom toe om meldingen te versturen (alleen iOS).
2. Druk op volgende wanneer dit is goedgekeurd.

U kunt de Otiom app niet gebruiken zonder goedkeuring.

### 3: Activeer het basisstation




1. Aan de zijkant van het basisstation zit een aan-uitknop. Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
2. Een rood lampje gaat snel knipperen.
3. Klik op "Volgende" als het basisstation heeft geknippert.

**NB:** Als het rode lampje van het basisstation langdurig permanent brandt, bent u het station aan het afsluiten. Druk opnieuw op de knop om het station opnieuw in te schakelen.




1. Op de achterkant van het basisstation staat een nummer.
2. Zoek het nummer in de lijst dat overeenkomt met uw basisstation.
3. Druk op het nummer.

## 4: Plaats het Otiom-basisstation

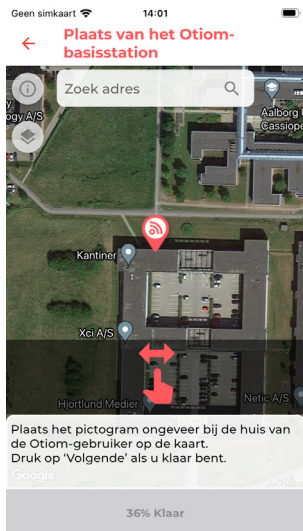

1. Als de getoonde locatie van het basisstation niet correct is, kunt u de locatie nu wijzigen. Typ hiervoor het adres in het witte veld.
2. Als de locatie van het basisstation niet helemaal correct is, kunt u de kaart met een vinger verplaatsen. Gebruik twee vingers om te zoomen.
3. Klik op "Volgende" zodra het pictogram op de juiste plaats staat.

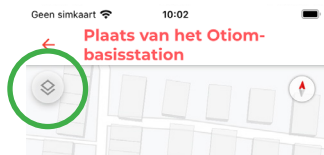


**INFO:** U kunt de manier waarop de kaart wordt weergegeven wijzigen door op het pictogram in de linker bovenhoek te klikken.



### Het Otiom-basisstation is klaar

**Uw Homebase is nu klaar om thuis geïnstalleerd te worden.**

- ✓ Plaats de Homebase vrij in het plafond of aan de muur op een centrale plek in huis. Gebruik de bijgeleverde tape.

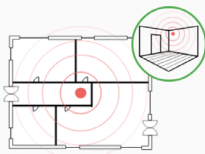

- ✗ Plaats de Homebase niet in een la of achterin een boekenkast.

43% Klaar

Volgende

**INFO:** Plaats het basisstation centraal in uw woning.

1. Uw Otiom-basisstation is nu klaar.
2. Klik op "Volgende".

## 5: Geef de Otiom-gebruiker een naam

### Otiom specificeren



Specificeren de Otiom-gebruiker die de Otiom-tracker gaat dragen.

Typ hier bijnaam

50% Klaar

Volgende

1. Voer de naam in van de patiënt die de Otiom-tracker dagelijks zal dragen.
2. Klik op "Volgende".

**NB:** Indien nodig kunt u de naam later wijzigen.

## 6: Voeg de Otiom-tracker toe



**INFO:** Voeg nu uw Otiom-tracker toe.

Hiervoor hebt u nodig:

1. De draadloze oplader.
2. De kabel.
3. Uw eigen voedingsbron.

1. Sluit de draadloze oplader aan op de voeding.
2. Druk op "Volgende" als de oplader drie keer snel knippert.



1. Als de oplader onder spanning staat, moet u de Otiom-tracker midden op de oplader leggen.
2. Druk op "Volgende" als het lampje op de oplader permanent brandt.

**NB:** Als u de Otiom-tracker verkeerd om of niet in het midden van de oplader hebt geplaatst, brandt de lamp niet permanent. Draai de Otiom-tracker in dit geval om en plaats het apparaat opnieuw op de oplader.



De app zoekt nu naar de Otiom-tracker. U hoeft niets te doen.

**NB:** Als de app een fout aangeeft, moet u:

1. ervoor zorgen dat er geen Otiom-trackers en opladers in de buurt zijn.
2. controleren of de Otiom-tracker correct op de oplader is geplaatst.

Als het bovenstaande niet werkt, moet u de app sluiten en het opnieuw proberen.

## 7: Registreer het apparaat op het netwerk



1. Uw Otiom-tracker is nu in de app toegevoegd en is bezig verbinding te maken met het netwerk.
2. **U krijgt een kennisgeving met de vraag om de tracker naar buiten te nemen zodat deze de locatiegegevens kan actualiseren.**
3. Dit scherm verdwijnt automatisch als de tracker is verbonden met het netwerk.



1. Als de tracker de locatiegegevens heeft geactualiseerd, verschijnt dit scherm met informatie.
2. **Ook ontvangt u een nieuw kennisgeving. Dit informeert u dat Otiom klaar is voor gebruik.**
3. Druk op "Voltooien".

**Otiom is pas operationeel nadat u de twee kennisgevingen hebt ontvangen!**

Als u tussen de twee kennisgevingen een alarm van Otiom krijgt, kunt u dit negeren.

In de instructies voor "**Persoonlijke instellingen**" kunt u lezen hoe de app werkt, hoe u de veiligheidsniveaus kunt wijzigen en meer helpers kunt toevoegen.

U vindt deze instructies op:  
[www.otiom.com/install](http://www.otiom.com/install)

**Gefeliciteerd!**  
Otiom is nu  
geactiveerd en  
klaar voor gebruik.